

# Como realizar o teste rápido para a malária

Modificado para a formação sobre a utilização do teste **Generic pf** para a malária falciparum




Recolher:

- Embalagem de teste por abrir **NOVA**
- Compressa com álcool por abrir **NOVA**
- Lanceta por abrir **NOVA**
- Par de luvas descartáveis **NOVAS**
- Solução tampão
- Cronómetro



## LEIA ESTAS INSTRUÇÕES ATENTAMENTE ANTES DE INICIAR.

- 1.** Verifique o prazo de validade na embalagem de teste.

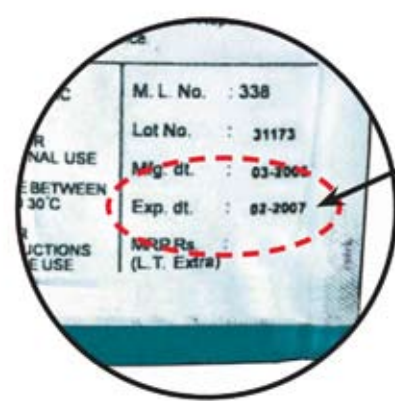


Prazo de validade

- 2.** Vista as luvas. Use um novo par de luvas para cada paciente.



- 3.** Abra a embalagem e remova:

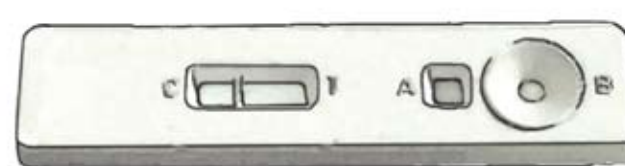

- Teste
- Tubo capilar
- Saqueta dessecante


- 4.** Escreva o nome do paciente no dispositivo.



- 5.** Abra o invólucro da compressa com álcool. Segure o 4.º dedo da mão esquerda do paciente. Limpe o dedo com a compressa com álcool. Deixe o dedo secar antes de fazer a picada.




- 6.** Retire a lanceta do respectivo invólucro. Pique o dedo do paciente para obter uma gota de sangue.

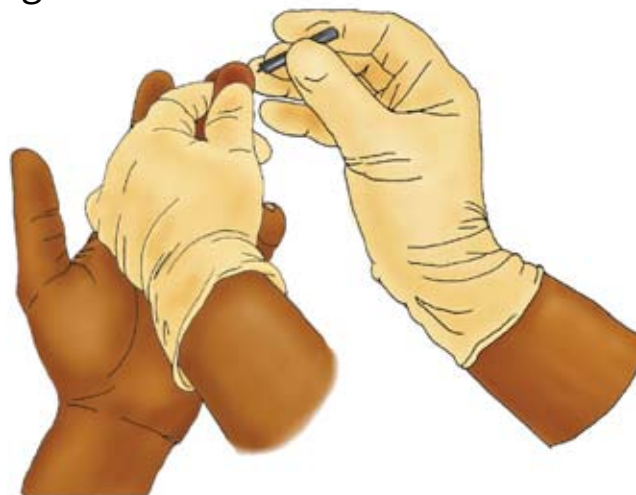


- 7.** Elimine a lanceta colocando-a no recipiente para resíduos cortantes imediatamente após efectuar a picada no dedo. **Não pouse a lanceta antes de a eliminar.**



- 8.** Utilize o tubo capilar para recolher a gota de sangue.

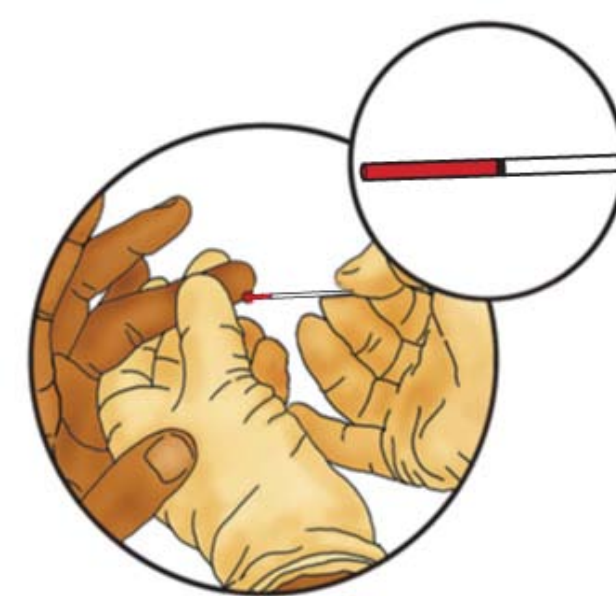

- 9.** Utilize o tubo capilar para colocar a gota de sangue na abertura quadrada assinalada com um "A".

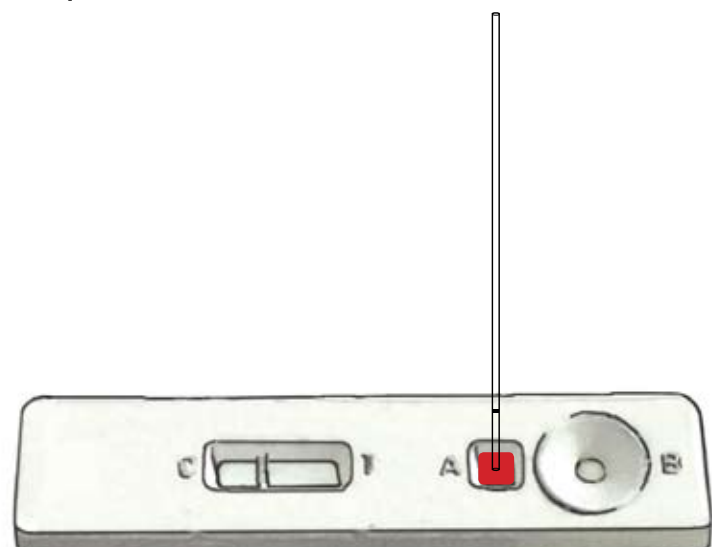

- 10.** Elimine o tubo capilar, colocando-o no recipiente para resíduos cortantes..



- 11.** Adicione solução tampão na abertura redonda assinalada com um "B".

Conte o número correcto de gotas



- 12.** Espere **15 minutos** após adicionar a solução tampão




- 13.** (NOTA: Não leia os resultados do teste antes de decorridos 15 minutos após adicionar a solução tampão. Pode obter resultados FALSOS.)

- 14.** Como ler e interpretar os resultados do teste:


### POSITIVO

Uma linha junto à letra "C" e uma linha junto à letra "T" significa que o paciente tem malária.

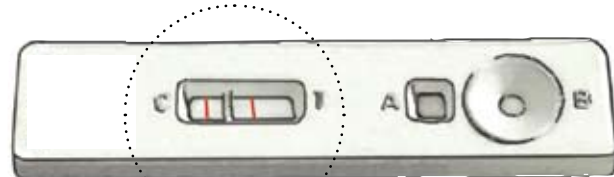


*P. falciparum*

O teste é **positivo** ainda que a linha junto à letra "T" seja **ténue.**

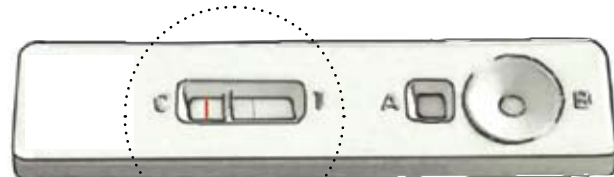

*P. falciparum* (positivo ténue)



**NEGATIVO** Uma linha junto à letra "C" e nenhuma linha junto à letra "T" significa que o paciente não tem malária

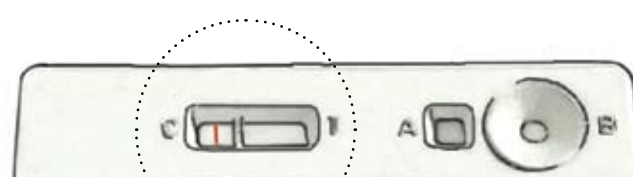

Negativo

### RESULTADO INVÁLIDO

Nenhuma linha junto à letra "C" e uma ou nenhuma linha junto à letra "T" significa que teste é INVÁLIDO

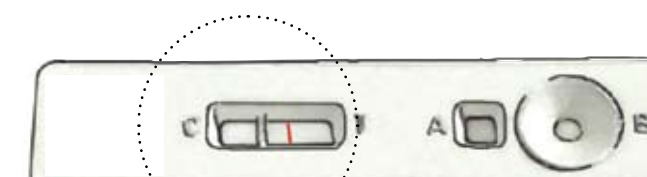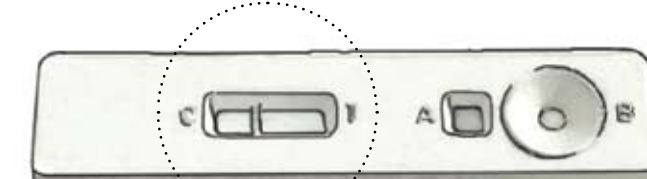

Se não surgir qualquer linha de controlo, repita o teste usando um novo RDT.

Se não surgir qualquer linha junto à letra "C," repita o teste utilizando uma embalagem de teste **por abrir NOVA** e uma lanceta **por abrir NOVA**.

- 15.** Elimine as luvas, a compressa com álcool, a saqueta dessecante e a embalagem num recipiente para resíduos não cortantes



- 16.** Registe os resultados do teste no seu registo de funcionário dos serviços de saúde comunitários. Elimine o dispositivo num recipiente para resíduos não cortantes.



**NOTA:** Cada teste apenas pode ser utilizado **UMA VEZ**. Não tente usar o teste mais do que uma vez.

