


# Comment réaliser le test de dépistage rapide du paludisme

Modifié pour la formation à l'utilisation du test générique Pf pour le paludisme falciparum



Recueillir :

- Un kit de test **NEUF non ouvert**
- Un tampon imbibé d'alcool **NEUF non ouvert**
- Une lancette **NEUVE non ouverte**
- Une paire de gants jetables **NEUVE**
- Une solution tamponnée
- Un chronomètre

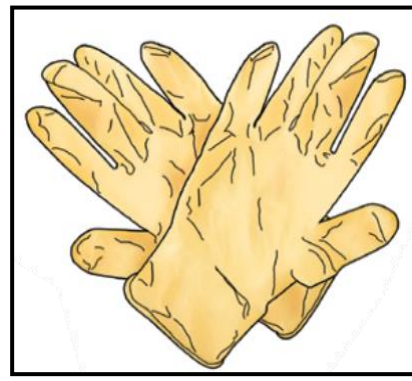


Gants jetables



Tampon imbibé d'alcool



Lancette

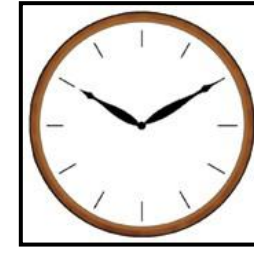

Chronomètre




Solution tamponnée



Kit de test

## LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER.

1. Vérifier la date d'expiration sur le kit de test.

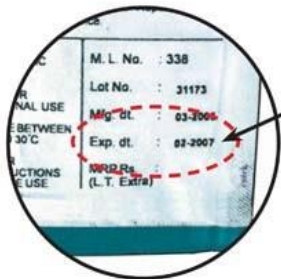


Date d'expiration

2. Mettre les gants. Utiliser des gants neufs pour chaque patient



3. Ouvrir le kit et retirer :

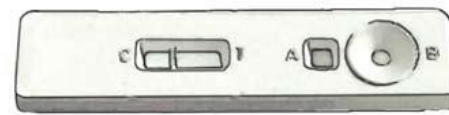


- Le test
- Le tube capillaire
- Le sachet de déshydratant

4. Noter le nom du patient sur le test.



5. Ouvrir le tampon imbibé d'alcool. Saisir l'annulaire de la main gauche du patient. Nettoyer le doigt avec le tampon imbibé d'alcool. Laisser le doigt sécher avant de piquer.

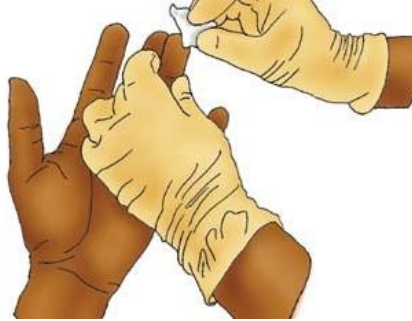


6. Ouvrir la lancette, piquer le doigt du patient pour obtenir une goutte de sang.




7. Mettre la lancette au rebut dans le conteneur à objets tranchants immédiatement après avoir piqué le doigt. **Ne pas poser la lancette avant de l'avoir mise au rebut.**



8. Utiliser le tube capillaire pour recueillir la goutte de sang.

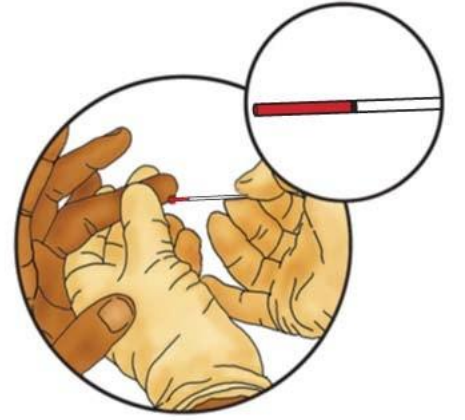


9. Utiliser le tube capillaire pour mettre la goutte de sang dans le trou carré indiqué par la lettre « A. »

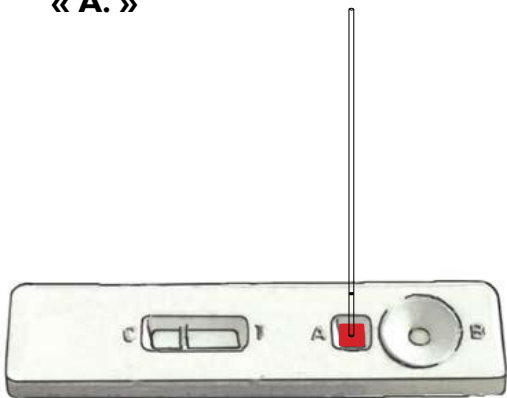

10. Mettre le tube capillaire au rebut dans le conteneur à objets tranchants.



11. Ajouter la solution tamponnée dans le trou rond indiqué par la lettre « B. »

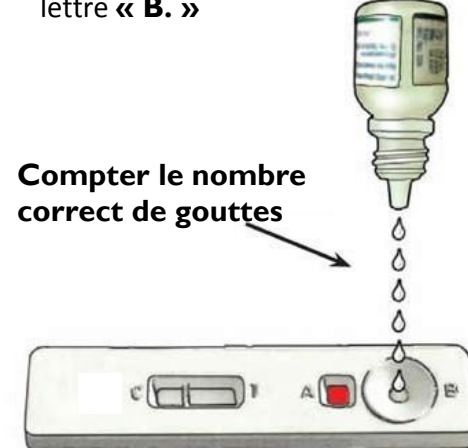

Compter le nombre correct de gouttes

12. Attendre **15 minutes** après avoir ajouté la solution tamponnée.




13. Lire les résultats du test. **(REMARQUE : ne pas lire le test avant la fin des 15 minutes suivant l'ajout de la solution tamponnée, au risque d'obtenir de FAUX résultats.)**

14. Comment lire les résultats du test :

### POSITIF

Une ligne près de la lettre « C » et une ligne près de la lettre « T » signifient que le patient souffre de paludisme.

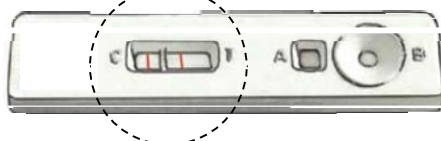

*P. falciparum*


Le test est **positif** même si la ligne près de la lettre « T » est **à peine visible**.



*P. falciparum* (à peine visible +)

### NÉGATIF



Une ligne près de la lettre « C » et **AUCUNE LIGNE** près de la lettre « T » signifient que le patient **NE** souffre **PAS** de paludisme.

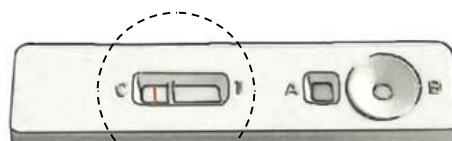

Négatif

### RÉSULTAT NON VALABLE

**AUCUNE LIGNE** près de la lettre « C » et une ligne ou aucune ligne près de la lettre « T » signifient que le test n'est pas valable.

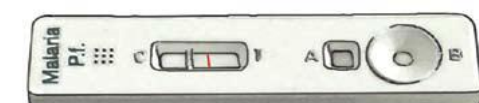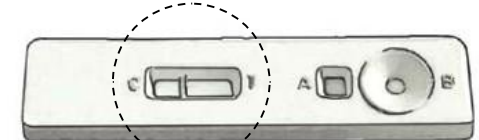

Répéter le test à l'aide d'un RDT neuf si aucune ligne de contrôle n'est visible.

Si aucune ligne n'apparaît près de la lettre « C », répéter le test à l'aide d'un kit de test **NEUF et non ouvert** et d'une lancette **NEUVE et non ouverte**.

**15.** Mettre les gants, le tampon imbibé d'alcool et le sachet de déshydratant au rebut et l'emballage dans un conteneur pour objets non tranchants.



**16.** Noter les résultats du test dans votre registre DMC. Mettre la cassette au rebut dans le conteneur pour objets non tranchants.



**REMARQUE :** chaque test peut être utilisé **UNE SEULE FOIS**. Ne pas essayer d'utiliser le test plusieurs fois.

